

# Technische Dokumentation

## FaceShield – FS-1



Identifikation: GTIN 9120101370213

**Gesichtsschild bestehend aus einer PETG-Folie und einem im FFF-Verfahren gedruckten PET-G Rahmen**

**Funktion:** der Gesichtsschild reduziert die direkte Luft- und Tröpfchenströmung ins Gesicht.

Der Rahmen wird mit einem verstellbaren Gummiband am Kopf gehalten. Alle Teile können zur Reinigung ohne Werkzeug voneinander getrennt werden. Das gelochte Gummiband wird dieses über die Haken gezogen. Das Band kann nach der Anpassung auf die individuelle Länge zugeschnitten werden.


**Material – Rahmen:** PET-G (Polyethylenterephthalat Glycol)


**Material – Folie:** PET-G (Polyethylenterephthalat Glycol)

**Die Reinigung ist u.a. mit folgenden Desinfektionsmitteln möglich:**


Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Natriumhypochlorit <12% und Wasserstoffperoxid <30%.

**ACHTUNG:** obwohl die Verwendung von Gesichtsschildern gegen den COVID-19-Virus selbst von der WHO empfohlen wird, ist das Produkt FS-1 keine genormte Schutzausrüstung nach Norm EU2016/425, bietet also keinen direkten und auf gar keinen Fall einen vollständigen Schutz gegen den COVID-19-Virus oder andere Infektionen. Es wird empfohlen, eine geeignete, genormte Schutzausrüstung gem. Empfehlung der WHO generell, oder zusätzlich zum Gesichtsschild anzuwenden.

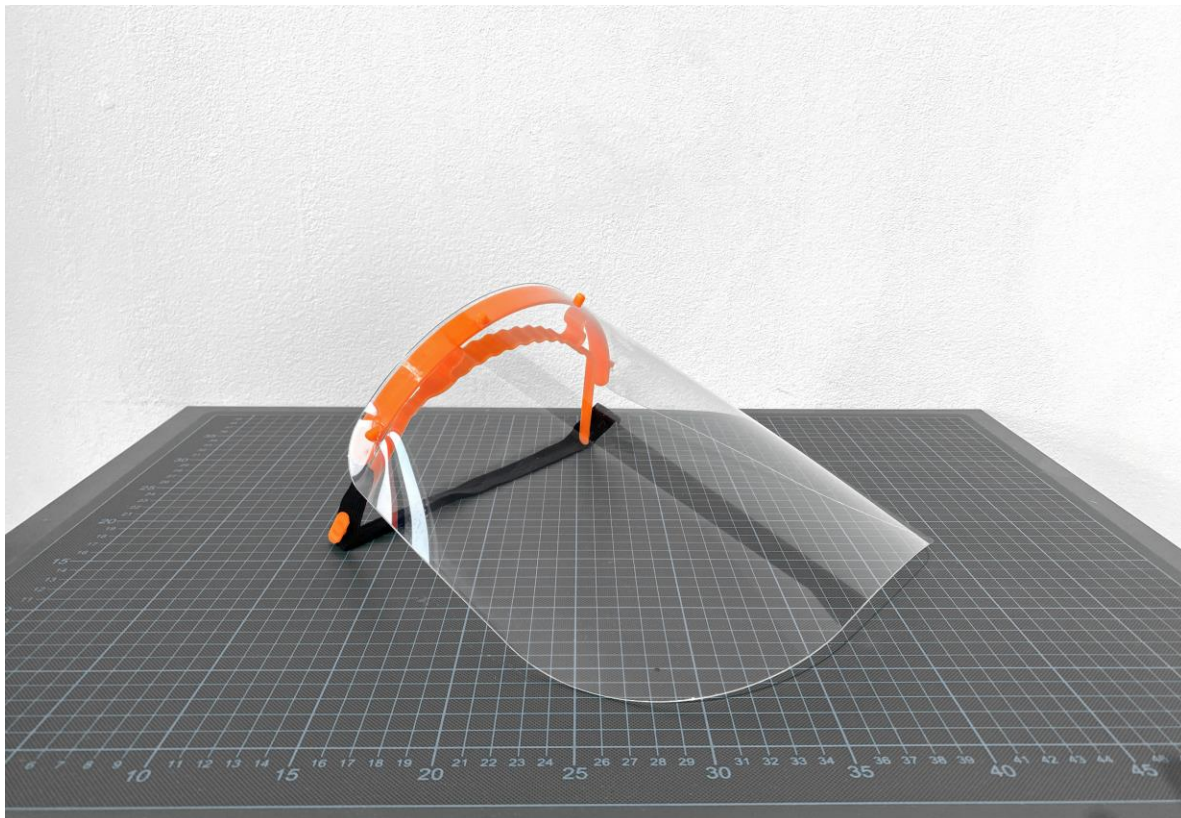

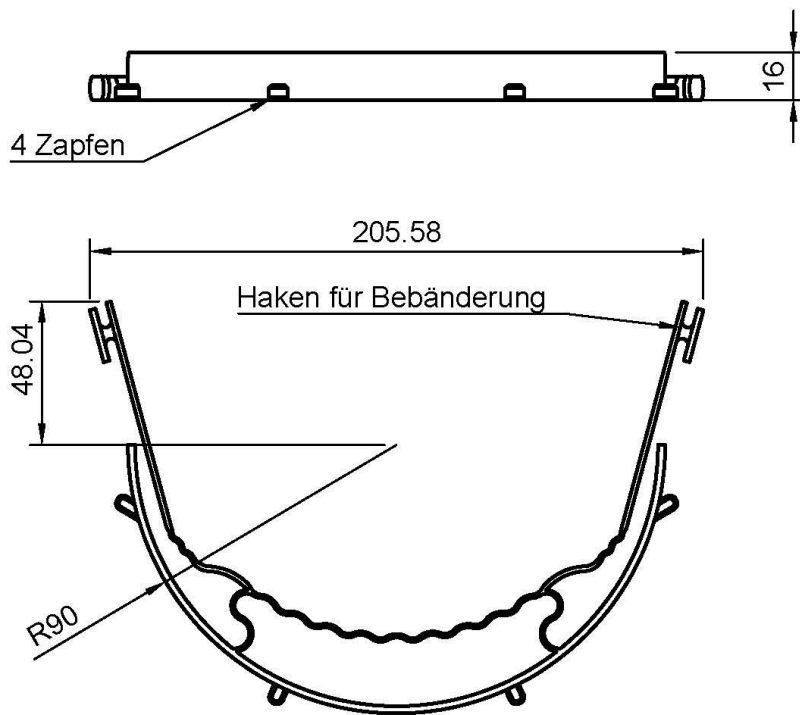

Dept.	Technical reference	Created by 3dee Store 31.03.2020	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title FaceShieldL2	DWG No.	
		Rev.	Date of issue	Sheet 1/1

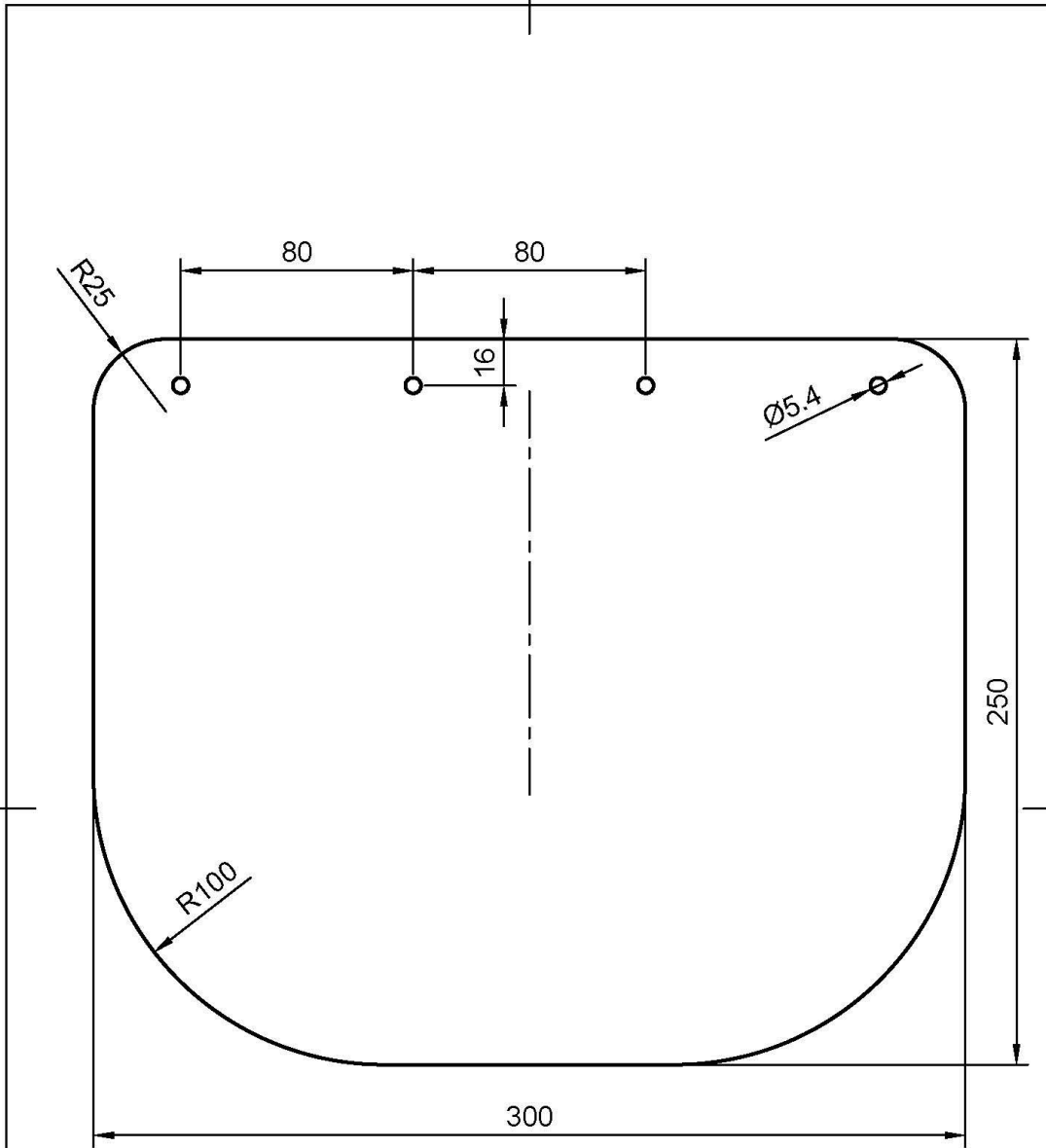

Dept.	Technical reference	Created by 3dee Store 31.03.2020	Approved by
		Document type	Document status
		Title FaceShieldScheibe2	DWG No.
		Rev.	Date of issue

FaceShield FS-1

